

GUÍA PASO A PASO

accuRPM
Powered by Tellihealth

Cómo empezar a utilizar la aplicación móvil de Evelyn

Paso 1

Busca “Evelyn Mobile” en la tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil.

Una vez descargada, haz clic en “Registrarse” e introduce tus datos para empezar. Cierra la aplicación y busca un mensaje de restablecimiento de contraseña en el correo electrónico que proporcionaste durante el registro.

Paso 2

En el correo electrónico, haz clic en el enlace “Restablecer contraseña”.

Crea y confirma tu contraseña personal. Para mayor seguridad, utiliza una mezcla de letras, números y caracteres especiales. A continuación, pulsa el botón “Iniciar sesión”.

Paso 3

En la pantalla principal, haz clic en la medición que quieras realizar, y se abrirán las instrucciones de uso del dispositivo. Deberás poder ver el manual de instrucciones directamente dentro de la aplicación.

Para ver un ejemplo real de uso del dispositivo seleccionado, cambia a la pestaña de vídeo y pulsa reproducir.

También puedes ver el historial de tus constantes vitales desde tu dispositivo, desplazándote a la sección “Todos los datos de salud”.

Otras ventajas de la aplicación Evelyn Mobile:



Sección de información con tu horario de medicación y manuales de usuario del dispositivo.



La sección **Actividad** para gestionar las notificaciones del dispositivo, ver las lecturas del dispositivo y obtener instrucciones de uso.



Sección “Interactúa” para obtener información de contacto e interactuar con nosotros.

Para ver la guía detallada paso a paso de la aplicación móvil de Evelyn visite accuhealth.tech/onboarding